



CURRENTA

Kurzanleitung

Biomonitoring Koffer für Einsatzkräfte



Biomonitoring nach Feuerwehreinsätzen – Ihr Plus an Sicherheit und Vertrauen

Schützen Sie Ihre Einsatzkräfte – zuverlässig und professionell.

Mit dem Biomonitoring der CURRENTA stellen Sie sicher, dass mögliche Gefahrstoffexpositionen wie gegenüber Benzol, Acrolein oder PAK frühzeitig erkannt werden. So geben Sie Ihrem Team Sicherheit, denn alle relevanten Werte werden für die arbeitsmedizinische Vorsorge dokumentiert. Auf Wunsch klären unsere erfahrenen Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner Ihre Einsatzkräfte über die Ergebnisse auf.

Optimieren Sie Ihre Schutzmaßnahmen.

Unsere Analysen zeigen, wie wirksam die verwendete persönliche Schutzausrüstung ist. Das schafft Transparenz und ermöglicht gezielte Verbesserungen für zukünftige Einsätze.

Leiten Sie einsatztaktische Maßnahmen ab.

Unsere Ergebnisse geben Ihnen aufschlussreiche Hinweise z. B. auf mögliche Zusammenhänge zwischen Gefahrenstoffexposition und Einsatzort. Mit den Erkenntnissen können Sie einsatztaktische Maßnahmen für zukünftige Einsätze treffen und die Sicherheit aller Einsatzkräfte weiter erhöhen.

Investieren Sie in die Gesundheit Ihrer Feuerwehr.

Langfristige Prävention senkt das Krebsrisiko und stärkt das Vertrauen Ihrer Einsatzkräfte in Ihre Organisation.



Kurzanleitung

Im Koffer enthalten

- Urinbecher
- Etiketten
- Handschuhe
- Einwegtrichterhilfen („Urinella“)
- Versandschein
- Datenschutzinformation
- Probenaufkleber
- Kurzanleitung

Durchführung – Schritt für Schritt



Probenentnahme & Dokumentation

Urin abgeben, Becher beschriften und beiliegenden Fragebogen ausfüllen.



Probentransport

Probe zu CURRENTA transportieren und an Fachperson übergeben.



Akkreditierte Analytik

Proben werden auf relevante Substanzen mit akkreditiertem Analyseverfahren überprüft.



Ergebnisaufbereitung & Auswertung

Individuelle Befunde werden an Betriebsärztin oder Betriebsarzt weitergeleitet, statistische Auswertung aller Proben erfolgt für die Einsatzleitung.



Optional: Ärztliche Beratung

Professionelle medizinische Beratung durch unsere ärztliche Abteilung.

Digitale Begleitdokumente

Dokumente vor der Probenabgabe ausfüllen

Für eine reibungslose und schnelle Bearbeitung bitte vorab digital ausfüllen

- Teilnehmerliste (Name, Vorname, Organisation)
- Liste der zuständigen arbeitsmedizinischen Dienste pro Organisation



Probenversand & Kontakt

Wichtige Hinweise

- **Zeitfenster einhalten**
Proben idealerweise 1-6 Stunden nach dem Einsatz sammeln
- **Nur Urin – kein Blut**
Eine Probe pro Einsatzkraft, Kühlung nicht erforderlich.
- **Kostenübernahme**
Kosten übernimmt in der Regel die Verursacher-Versicherung. Minimaler Aufwand.
- **Ärztliche Beratung**
Optionales Gespräch mit unseren erfahrenen Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmedizinern

Probenversand – Nach vorheriger Absprache

Postweg

Versand per Post möglich

Kurierdienst

Auf Wunsch organisieren wir den Transport für Sie

Persönliche Anlieferung

Mo-Fr 8-14 Uhr

CURRENTA GmbH & Co. OHG Institut für Biomonitoring
Chempark Leverkusen Gebäude Q 18, D-51368 Leverkusen



Kontakt

Erstkontakt & Notfall

Sicherheitszentrale CHEMPARK

Allgemeine Fragen zum Biomonitoring,
Probenahme, Lagerung & Anlieferung

+ 49 214 26059339

24/7 erreichbar

Biomonitoring-Labor

- Detailfragen zu Ablauf, Gefahrstoffen & individuellem Einsatz
+49 214 31399679
Geschäftszeiten Mo-Fr 8-16 Uhr
- Dr. Isabell Schönraath (Laborleitung)
isabell.schoenrath@currenta.biz
- Dr. Laura Tretzel (Institutsleitung)
laura.tretzel@currenta.biz

Weiterführende Informationen

currenta.de/leistung/gesundheitsinstitut-fuer-biomonitoring/biomonitoring

